



Hochvisköse Augentropfen mit 0.30% Hyaluronat zur Linderung und Pflege bei trockenen Augen

Indikationen und Anwendungsbereich

„ocuvers drops Gel“ eignet sich besonders bei Belastungen durch Umweltstress z.B. bei Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung sowie Beschwerden nach diagnostischen, nicht invasiven Eingriffen am Auge. Bei ungenügender Tränensekretion wird der Tränenfilm stabil gehalten. Pflegt, durch beispielsweise intensive Arbeit an Computerbildschirmen sowie bei langen Autofahrten oder Reisezeiten strapazierte Augen.

Einfache Anwendung

- Dispenser gut festhalten. Mit Zeigefinger auf der hinteren Seite mit leichtem Druck einen Tropfen Gel lösen.
- Das einfach zu dosierende, patentierte One-Drop-System ermöglicht eine einfache Handhabung und eine hohe Therapietreue auch bei empfindlichen Augen oder älteren Patienten. Das System ist auf 0,05 ml pro Tropfen geeicht: 200 Tropfen Wellness für das Auge!
- Tropferspitze nicht berühren und nicht am Auge aufsetzen.
- Kopf idealerweise in den Nacken legen und den Tropfen in den äusseren Lidwinkel geben.
- Empfohlen werden 1-2 Tropfen pro Anwendung, nach Bedarf mehrmals täglich.

Produkteigenschaften

- Stimuliert und unterstützt die regenerierenden Eigenschaften der Cornea.
- Schützt das Auge vor Trockenheit, Reizung und Müdigkeit.
- Erhält den Tränenfilm zum besseren Schutz des Auges.
- Enthält keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs.
- Verbessert den Tragekomfort bei Irritationen durch Contactlinsen.

Weitere Hinweise

- Im Fall von Irritationen Produkt nicht mehr verwenden und den Augen-Spezialisten aufsuchen.
- Nicht verwenden, wenn eine Allergie auf einen Inhaltsstoff besteht.
- Vor Licht und Hitzequellen schützen, bei Temperaturen von 5 – 30°C aufbewahren.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht einnehmen.
- Nicht über Verfalldatum hinaus verwenden.
- Nicht länger als 6 Monate nach Anbruch des Behälters verwenden.
- Steril bis zur ersten Verwendung.

Zusammensetzung

Klassifizierung in Klasse IIb Medizinprodukt.

- Natriumhyaluronat 0,30%
- Borat gepuffert
- Natriumchlorid
- EDTA
- Microglycin 50
- entionisiertes Wasser

Gebrauch nach Öffnen des Behälters: 6 Monate
Nicht nach dem Verfalldatum verwenden.

Konfektion

- 10 ml mit Tropfenspender (One-Dropper MDO)

Literatur

Alle Unterlagen im Original bei:
INNOMEDIS AG
Walther-Rathenau-Strasse 5
D-50996 Köln
info@ocuers.eu