



Le comprimé de nettoyant enzymatique OPTOSOL contient une combinaison nettoyante unique d'ingrédients actifs sous forme d'enzymes spéciales pour éliminer les protéines, les lipides, les mucines et autres dépôts.

Application

La tablette de nettoyage enzymatique OPTOSOL peut être dissoute dans la solution peroxyde "tab in one", la solution saline Contopharma et simply one. A la fin du temps d'action, les lentilles de contact peuvent être rincées et désinfectées avec n'importe quel système d'entretien. Le système à peroxyde "oxystar" ne convient pas.

Si la tablette de nettoyage enzymatique OPTOSOL est utilisée avec la solution peroxyde "tab in one", la tablette bio-indicatrice est omise. Laisser les lentilles de contact se nettoyer intensivement pendant 4 heures, puis jeter la solution et rincer les lentilles de contact. Avant de mettre la lentille de contact, effectuer la désinfection habituelle "tab in one".

La tablette de nettoyage enzymatique OPTOSOL doit être utilisée une fois par semaine.

Remarques importantes

Ne pas mettre la solution de nettoyage enzymatique OPTOSOL directement dans les yeux ou utiliser les lentilles de contact sans les avoir préalablement rincées et désinfectées.

Une utilisation inappropriée peut entraîner une irritation de l'œil. Si l'irritation de l'œil persiste, retirez la lentille et consultez votre spécialiste en lentilles de contact.

N'utiliser que des comprimés de nettoyage enzymatique OPTOSOL en parfait état.

Ne pas laisser les lentilles de contact plus d'une nuit dans la solution de nettoyage enzymatique.

Ne pas ingérer les comprimés.

Composition

Subtilisine A

Confection

1 boîte de 10 comprimés

Literature

¹ data on file: Contopharma AG